


ANLEITUNG



boomer test
DNA-Analyse für Mischlingshunde

1. Füllen Sie bitte zuerst das beigefügte Kundeninformationsblatt vollständig aus.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund mindestens 1 Stunde vor Probennahme nichts mehr gefressen hat. Bitte achten Sie auch peinlichst genau darauf, dass Ihr Hund in diesem Zeitraum keinen Kontakt zu anderen Hunden, Hundespielzeug, Stöckchen, Fress- und Wassernäpfen und allem hatte, woran er rumkauen konnte. Nur wenn sich im Maul des Hundes nichts als die eigene DNA befindet ist mit einem korrekten Ergebnis zu rechnen.
3. Sollten Sie mehrere Hunde testen lassen wollen, beachten Sie bitte folgendes: Führen Sie alle Schritte der Probennahme erst für einen Hund durch, dann für den nächsten. Bringen Sie die Proben der verschiedenen Hunde nicht miteinander in Kontakt. Waschen Sie sich nach jeder DNA-Abnahme die Hände bevor Sie die Tupfer für den Abstrich des nächsten Hundes entnehmen. Nur so können Sie eine eventuelle gegenseitige Verunreinigung der Proben vermeiden.

ENTNEHMEN SIE DIE ABSTRICHTUPFER

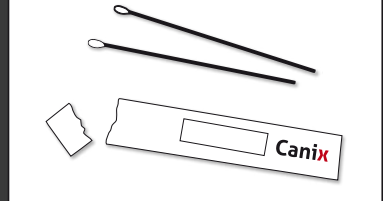

ENTNEHMEN SIE DIE SPEICHELPROBE

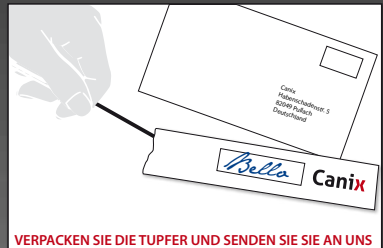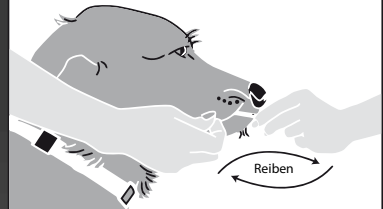

VERPACKEN SIE DIE TUPFER UND SENDEN SIE SIE AN UNS

4. Entnehmen Sie den ersten sterilen Abstrichtupfer aus der Verpackung.
5. Zur Probenentnahme mit den Tupfern auf der Wangeninnenseite für mindestens 10 Sekunden hin und her reiben (Reiben ist wichtig, um genügend Zellen der Mundschleimhaut einzusammeln). Sie können den Prozess optimieren, indem Sie währenddessen leichten Gegendruck von der Aussenseite erzeugen. Ihren Hund können Sie dabei nicht verletzen! Je länger und fester Sie reiben, desto mehr Zellen werden entnommen. So erhöhen Sie die Chancen auf einen erfolgreichen Test.
6. Wiederholen Sie Schritte 4 und 5 mit dem zweiten Abstrichtupfer.
7. Im Anschluss lassen Sie beide Tupfer für mindestens 30 Minuten an der Luft trocknen. Achten Sie auch hierbei darauf, daß die Wattetupfer während des Trocknens nicht mit Gegenständen irgendeiner Art in Berührung kommen. Stellen Sie die Tupfer z.B. zum Trocknen mit dem Wattekopf nach oben in ein Gefäß.
8. Nach dem Trocknen stecken Sie die Tupfer mit dem Wattekopf voran zurück in ihre Verpackung. Schreiben Sie den Namen Ihres Hundes auf die Verpackung!
9. Stecken Sie die verpackten Tupfer in den von uns mitgelieferten Rückumschlag, frankieren Sie diesen und senden Sie ihn an uns zurück. Proben von mehreren Hunden sollten in getrennten Briefen an uns zurückgeschickt werden! Jedem Umschlag sollte das jeweils passende Kundeninformationsblatt beiliegen.
10. Etwa 6 Wochen nach Eingang Ihrer Proben erhalten Sie das Ergebnis des Tests per Email.